


**1**

Het chirurgische masker opzetten


**1** Was en desinfecteer uw handen




**2** Controleer het chirurgische masker

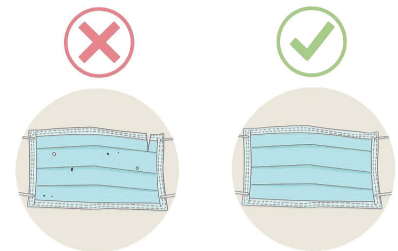


**3** Draai het in de juiste richting

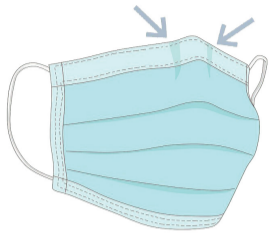


**4** Plaats de juiste kant op je gezicht

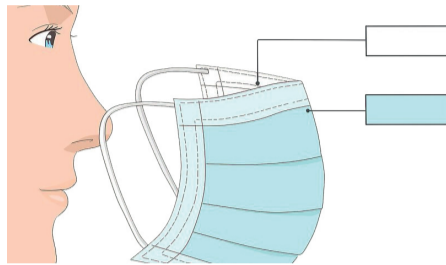


**5** Plaats het op je gezicht

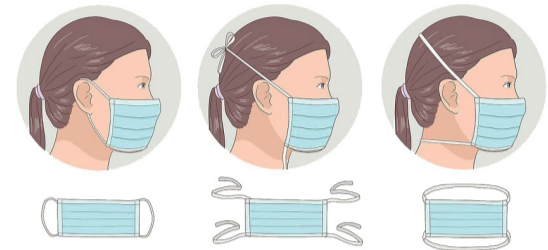


**6** Pas het neusstuk aan

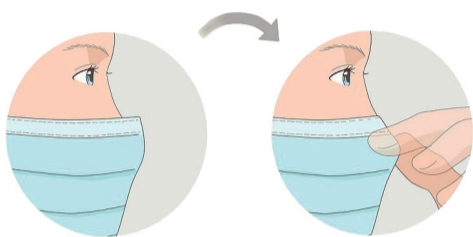

**7** Maak zo nodig de onderste band vast

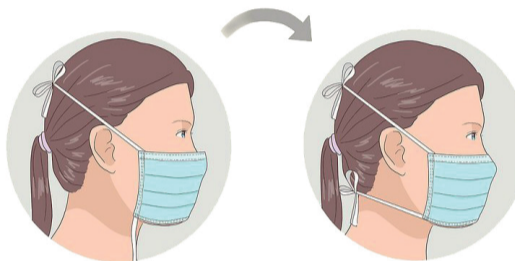

**8** Pas het masker aan

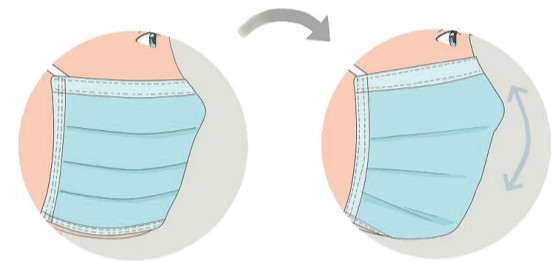

**2**

Het chirurgische masker afzetten

**1** Was en desinfecteer uw handen



**2** Opgelet: raak NOOIT de voorkant aan wanneer je het masker afzet!

Gebruik de banden




**3** Bewaar het masker in een papieren enveloppe of in een met de hand wasbare verpakking


**3**

Het chirurgische masker afzetten

**1** Werp het masker veilig weg na maximum 8 uur gebruik

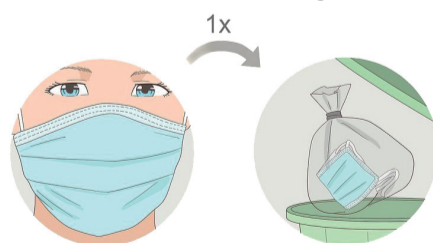

**2** Was je handen opnieuw

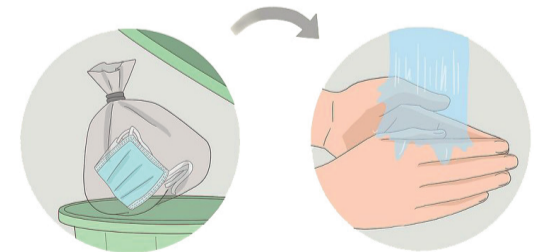

Bekijk ook de affiches "**Wie moet een chirurgisch masker dragen?**" en "**Welk masker gebruiken?**" via [www.iriscare.brussels](http://www.iriscare.brussels) > professionals

Bron en afbeeldingen: <https://fr.wikihow.com/mettre-un-masque-chirurgical>.  
Aanbevelingen aangepast op basis van de aanbevelingen van de Risk Management Group.

Deze communicatie is enkel geldig in de context van de epidemische fase van het coronavirus.  
Deze aanbevelingen kunnen worden aangepast op basis van de evolutie van de epidemie en de beschikbare voorraden.  
Voor meer informatie kun je terecht op [www.iriscare.brussels](http://www.iriscare.brussels) of kun je contact opnemen met je inspecteur of controleur.

Aanbevelingen van 27 maart 2020.